

Velferdsteknologisk hjelpemiddel som følger brukeren gjennom hele omsorgstrappen



Eksempler på bruksområder:

- Redusert antall hjemmebesøk
- Medisinpåminning
- Kalendervarsler
- Egenmestring
- Kognitiv støtte
- Hverdagsrehabilitering
- Koordinering av aktiviteter rundt brukeren


Memas kan tilpasses eldre og yngre brukere med ulike utfordringer, for eksempel behov for tidsstyring, hukommelsesstøtte eller ved uro.

Velferdsteknologiske hjelpemidler kan være et viktig bidrag i å utsette overgangen til neste trinn i omsorgstrappen.

Memas kan brukes i alle trinnene i omsorgstrappen. Den kan effektivisere kommunens tjenester og tilpasses brukernes endrede behov. Produktet kan bidra til at brukere kan være selvhjulpne lenger og øke graden av mestring også i de siste trinnene i trappen.

Ved optimal bruk vil dette kunne redusere kommunens kostnader vesentlig.

Funksjoner i Memas

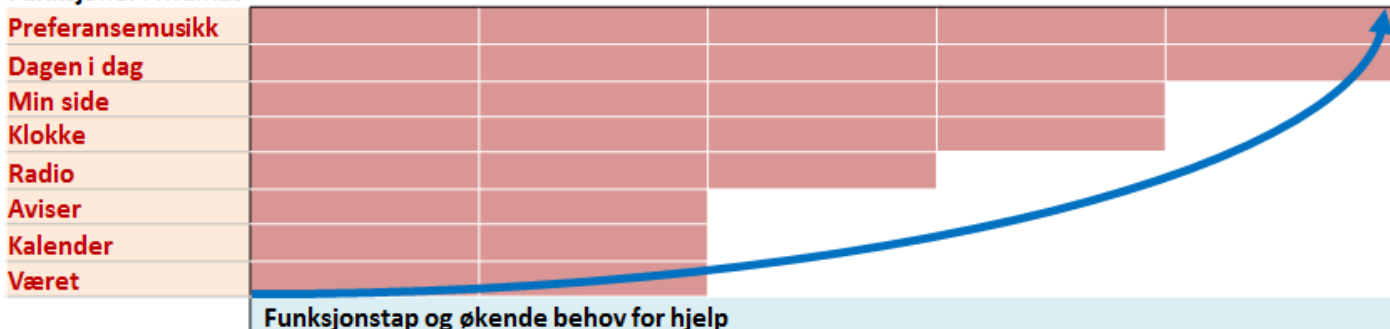

Brukergrupper i OMSORGSTRAPPEN

Kommunens tjenestetilbud

Hjemmeboende

Trygghetsalarm
Matbringning

Hjemmeboende

Hjemmehjelp
Praktisk bistand
Dagtilbud

Tilrettelagt bolig

Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Rehabilitering

Omsorgsbolig

Sykehjem

Memas i hverdagen

I en kommune på Østlandet ble antall hjemmebesøk redusert fra 6 til 2 pr. døgn ved at brukeren får varsel om når medisin skal inntas, ved hjelp av Memas-kalenderen.

På et dagsenter i Oslo brukes bilder og symboler i kommunikasjonen med dagsenterbrukere som ikke lenger har språk, ved hjelp av Memas-funksjonen 'Min side'.

NRK Østlandssendingen rapporterer at hjemmetjenesten bruker 60 % mindre tid hos brukerne etter innføring av velferdsteknologi.

Forskning viser at man sparer 73 000 kroner i året på hver bruker.

Memas ble utviklet i et europeisk forskningsprosjekt der Norge var i førersetet.

Memas ble prøvd ut i Norge, Tyskland og Storbritannia allerede i 2011.

Resultatene viste at brukerne likte Memas, de var i stand til å benytte det på egenhånd til tross for nedsatt kognitivt funksjonsnivå, og at pårørende opplevde mindre stress i hverdagen.

Det er mange fornøyde brukere av Memas i mange kommuner rundt om i Norge.

Memas kan ses og prøves i mange visningsleiligheter i Norge, f.eks.:

- Almas hus i Oslo kommune
- Innovatoriet på Høgskolen i Sørøst-Norge
- Visningsmiljøer i Trondheim, Stjørdal og Tromsø

Den komplette listen finnes på våre nettsider.

Bergens Tidende LOGG INN

Nettbrett hjelper demente å huske

ENKLERE HVERDAG: Med barn og barnebarn som er mye på reiseferd, er det godt for Gunvor Moberg å holde styr på hvor de er ved hjelp av nettbrettet. Her kan hun også holde oversikt over avtaler og besøk. FOTO: ODD E. NERBØ

Eksempler på kommunesamarbeid:

- Kristiansand
- Larvik
- Malvik
- Moss
- Oppegård
- Oslo
- Steinkjer
- Tromsø
- Trondheim

Funksjonalitet og bruksmuligheter

Memas følger hele omsorgstrappen og kan personaliseres til brukerens behov og funksjonsnivå.

Eksempler på innstillinger er:

- Valg av funksjoner som vises til brukeren (se bildet nedenfor)
- Gradvis forenkling
- Fargepalett (også høykontrast)
- Navngivelse av døgnets tider
- Valg av kontaktpersoner for brukeren
- Preferansemusikk

Innstillingene gjøres enkelt på nettstedet adminweb.no. Der kan man også følge med bruken av nettbrettet, og kontrollere at nettbrettet fungerer som det skal.

Nettbrettets grensesnitt er utformet med klart visuelt språk og er grundig testet av brukere med både kognitive, motoriske og synsrelaterte funksjonsnedsettelse.

Brukeren trenger minimal opplæring.

Memas gir mange muligheter til kreative løsninger, f.eks.:

- For **kognitiv støtte** kan kalenderen inneholde påminnelser om dagliglivets aktiviteter.
- I **hverdagsrehabilitering** kan albumet inneholde fortelling om "mitt liv", trinnvis bruksanvisning for et husholdningsapparat, eller en "bildekatalog" over venner og familiemedlemmer.
- For å framkalle **restevnen** kan f.eks. aviser velges ut fra interesse.

Preferansemusikk er en ny Memas-funksjonalitet. Den er basert på kunnskapen om musikkterapi. Musikk kan berolige brukeren og framkalle minner.

Memas-kalenderen kan minne brukeren daglig om at nå er det "musikktid". Brukeren kan selv spille av sin preferansemusikk.

Menyelementer

Tjenestene på brukerens Memas-nettbrett kan bli tilpasset til brukerens ønsker og behov. Tjenestene som er tilgjengelig vises som en rekke menyelementer nederst på skjermen til nettbrettet. Du kan velge og fjerne menyelementer ved å krysse av og på i avkrysningsboksene ved siden av menyelementene. Avkryssede menyelementer blir synlige for brukeren på Memas-nettbrettet.

Du kan velge og fjerne elementer på nettbrettet ved å krysse av i boksene under hvert menyelement. Når du velger "Lagre meny" vil menyen på nettbrettet bli oppdatert. Legg merke til at "I dag" er et menyelement som ikke kan fjernes.

Du kan gjøre innstillinger til de valgte tjenester ved å velge tjenesten i menyen til venstre. ?

 I dag <input checked="" type="checkbox"/>	 I morgen <input type="checkbox"/>	 Kalender <input checked="" type="checkbox"/>	 Uke <input type="checkbox"/>	 Bilder <input checked="" type="checkbox"/>
 Været <input type="checkbox"/>	 Radio <input checked="" type="checkbox"/>	 Aviser <input checked="" type="checkbox"/>	 Min side <input checked="" type="checkbox"/>	 Kontakt meg <input checked="" type="checkbox"/>
 Lyd <input checked="" type="checkbox"/>	 Musikk <input checked="" type="checkbox"/>			

Hvordan Memas kan leveres

Innkjøp for institusjon/flere brukere

Leveransen inneholder (i ønsket antall):

Programvaren Memas
Brukerkonti
Nettbrett og stativ
Strømkabel
Veiledningshefte med nyttige tips
Service og support

Tillegg:

Installering på ønsket sted
Opplæring av ansatte
Eventuelle fraktkostnader
Tilrettelegging og funksjonstilpassing hos bruker (valgfritt)

Se prisliste

Innkjøp for én bruker

Pakken inneholder:

Programvaren Memas
Brukerkonto
Nettbrett og stativ
Strømkabel
Veiledningshefte med nyttige tips
Service og support pr. telefon

Tillegg:

Installeringskostnad
Fraktkostnader
Tilrettelegging og funksjonstilpassing hos bruker (valgfritt)

Se prisliste

Vi leverer også kurs og tilrettelagt opplæring i bruk av velferdsteknologi til pleie- og omsorgspersonell og pårørende.

Memas bestilles hos Mylifeproducts AS:

Telefon: 47 27 22 65

E-post: post@mylifeproducts.no

Bestillinger for privatkunder kan også gjøres direkte på vårt nettsted:

www.mylifeproducts.no

Innlegg om Memas og velferdsteknologi legges jevnlig ut på vår Facebook-side:

www.facebook.com/MylifeproductsAS